

Enviar diseños de estructuras dentales

Introducción

Este documento le proporciona una guía para enviar diseños de estructuras desde sistemas de CAD abiertos a las instalaciones de fabricación centralizada de Renishaw. El documento asume que el diseño ha sido creado y guardado como un archivo ".stl" en una ruta de su PC, que este tiene acceso a Internet y que el software Renishaw inciseCAD está instalado y listo para ser utilizado.

Nota: A partir de archivos ".stl" solo es posible fabricar coronas y puentes de cromo cobalto.


Instrucciones

Abra Renishaw inciseCAD 🗐 1.



Haga clic en el botón Inicio de Windows > Todos los programas > Renishaw PLC > inciseCAD > inciseCAD.

- Haga clic en Nueva receta 🔀 2.
- Haga clic en Añadir estructura 3.
- 4. Defina la estructura.

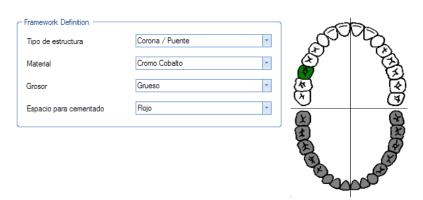

Seleccione el tipo de estructura: Corona/Puente.

Seleccione el material: "Cromo cobalto".


Tenga en cuenta que las opciones de "Grosor" y "Espacio para cementado" no tienen efectos sobre el diseño.

- 5. Haga clic en Aceptar
- Seleccione Importar datos de CAD 6.





7. Explore el directorio en el que haya guardado el archivo de diseño ".stl" y haga clic en Abrir. Verá el diseño de la estructura en la vista principal.

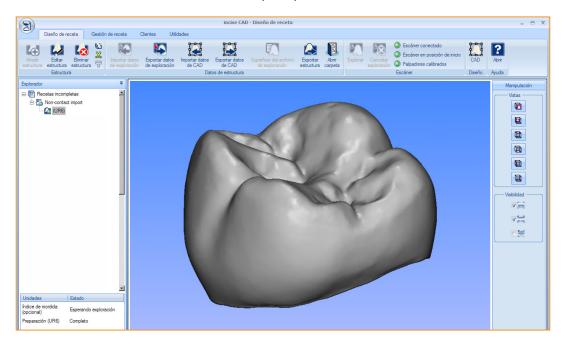

En el árbol de exploración de la receta, verá que esta se ha marcando con una "luz verde" 8. indicando que ya está lista para ser enviada 🎴

Asegúrese de que ha seleccionado la receta y haga clic en Enviar a fabricación central Haga clic en "Sí" en el cuadro de diálogo que se ha abierto para enviar el diseño.

Estado de la receta

Puede obtener actualizaciones en tiempo real del estado de la receta mediante el uso de la función "Gestión de recetas" en inciseCAD.

Haga clic en la pestaña "Gestión de receta" y en el panel del explorador, seleccione "Envíos centrales recientes". Aparecerá la lista de todas las recetas enviadas. Cuando haga clic sobre la receta en el árbol de recetas aparecerá un cuadro de diálogo mostrando el estado de la receta.



Si se le ha enviado ya la receta, puede hacer el seguimiento del envío haciendo clic en Courier Link.

