

Envio de concepções de estruturas dentárias

Introdução

Este documento fornece orientação sobre o envio de concepções de estruturas de sistemas CAD abertos para a produção central da Renishaw. Assume-se que a concepção foi criada e guardada como um ficheiro “.stl” em uma localização central no PC e que o PC tem acesso à Internet, bem como o Renishaw inciseCAD instalado e pronto a usar.

Nota: Só é possível a produção de coroas e pontes em cobalto-crómio a partir de ficheiros “.stl”.


Instruções

1. Abra o Renishaw inciseCAD 

No Windows, clique em Iniciar > Todos os programas > Renishaw PLC > inciseCAD > inciseCAD

2. Clique em **Nova prescrição** 
3. Clique em **Adicionar estrutura** 
4. Defina a estrutura.

Framework Definition	
Tipo de estrutura	Coroa / Ponte
Material	Cobalto-crómio
Espessura	Espesso
Espaço de fixação	Frouxo

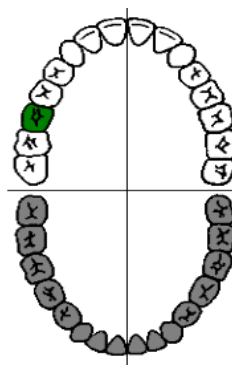


Selecione o tipo de estrutura – “Coroa / Ponte”.

Selecione o material – “Cobalto-crómio”.

Tenha em atenção que as opções de “Espessura” e “Espaço de fixação” não têm efeito na concepção.

5. Clique em **OK**.
6. Selecione **Importar dados CAD** 

7. Navegue para a localização onde o ficheiro de concepção “.stl” foi guardado e clique em **Abrir**. Poderá ver a concepção da estrutura na visualização principal.

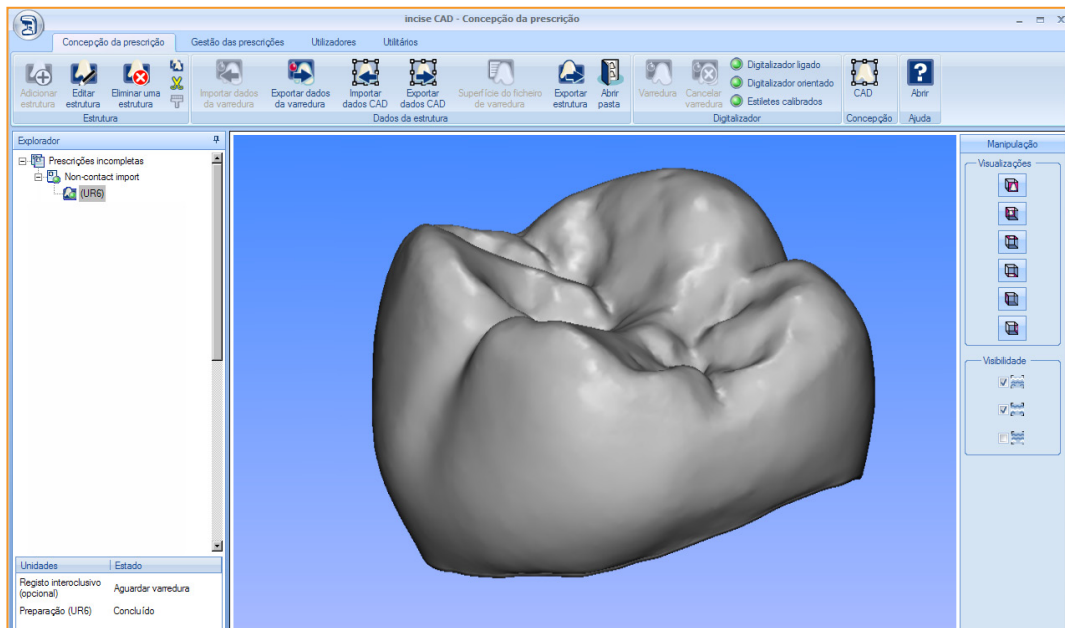

8. Na árvore do explorador de prescrições, poderá ver que a prescrição recebe “luz verde”, indicando que está pronta para o envio .

Certifique-se de que a prescrição está seleccionada e clique em **Enviar para produção central** .

Clique em “Sim” na caixa de diálogo que surge e a concepção é enviada.

Estado da prescrição

Pode obter actualizações em tempo real sobre o estado da prescrição ao usar a função “Gestão de prescrições” no inciseCAD.

Clique na guia “Gestão de prescrições” no painel do explorador e seleccione “Envios recentes para a central”. É exibida uma lista de todas as prescrições enviadas. Clique na prescrição a partir da árvore de prescrições, surgirá uma caixa de diálogo exibindo o estado da prescrição.

Non-contact import		Non-contact import	
Nome do dentista	Dr Forsell	Nome do dentista	Dr Forsell
Nome do paciente	WJMO	Nome do paciente	WJMO
Contagem da estrutura	1	Contagem da estrutura	1
Data de envio	22/08/2012	Data de envio	22/08/2012
Acompanhamento do correio:	Not currently available	Acompanhamento do correio:	courier link
 Received		 Dispatched	

Se a prescrição foi enviada, pode acompanhar o seu progresso clicando em **Courier Link**.

