

Envoyer les conceptions de prothèses dentaires

Introduction

Ce document fournit les directives pour l'envoi des conceptions de prothèses, depuis des systèmes CAO ouverts à l'unité de fabrication principale de Renishaw. Cela suppose d'avoir créé et enregistré la conception dans un fichier au format « .stl » sur un emplacement centralisé de votre ordinateur, celui-ci devant avoir un accès Internet avec le logiciel Renishaw inciseCAD installé et prêt à l'emploi.

Remarque : il n'est possible de fabriquer que des couronnes et des bridges en cobalt-chrome à partir de fichiers « .stl ».

Instructions


1. Ouvrez Renishaw inciseCAD 

Cliquez sur Démarrage de Windows > Tous les programmes > Renishaw PLC > inciseCAD > inciseCAD

2. Cliquez sur **Nouvelle prescription** 


3. Cliquez sur **Ajouter une prothèse** 

Framework Definition	
Type de prothèse	Couronne/Bridge
Matériau	Cobalt-chrome
Épaisseur	Épais
Espace de scellement	Large

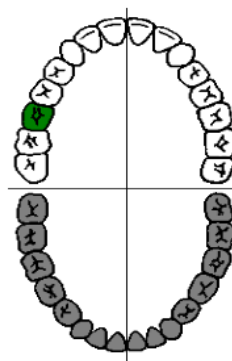

4. Définissez la prothèse.
Sélectionnez le type de prothèse – « Couronne/Bridge ».
Sélectionnez le matériau – « Cobalt Chrome ».
Notez que les options « Épaisseur » et « Espace de scellement » n'ont aucun effet sur la conception.
5. Cliquez sur **OK**
6. Sélectionnez **Importer les données CAO** 

7. Recherchez l'emplacement où le fichier de conception « .stl » a été enregistré et cliquez sur **Ouvrir**.
La conception de prothèse s'affiche sur l'écran principal.

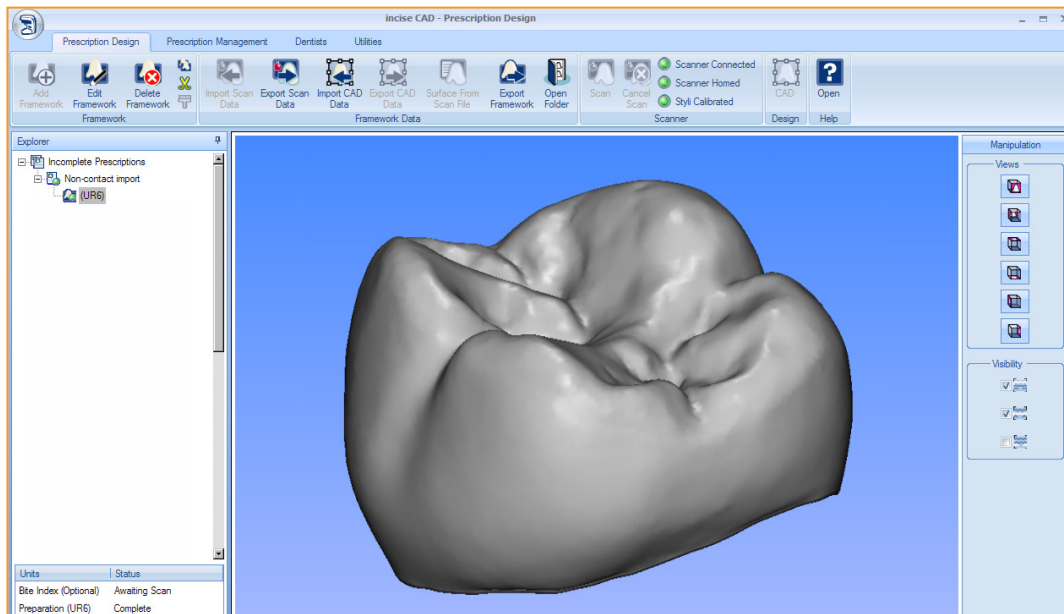

8. Dans l'arborescence de l'explorateur des prescriptions, la prescription arbore un « feu vert », indiquant qu'elle est prête à être envoyée .

Vérifiez que la prescription est en surbrillance et cliquez sur **Soumettre à l'unité de fabrication principale** .

Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, cliquez sur « Oui » pour envoyer la conception.

Statut de la prescription

Vous pouvez obtenir, en temps réel, le statut à jour de la prescription, à l'aide de la fonction « Gestion des prescriptions » dans inciseCAD.

Cliquez sur l'onglet « Gestion des prescriptions » et dans le volet de l'explorateur, sélectionnez « Soumissions récentes adressées à l'unité principale ». Une liste de toutes les prescriptions envoyées s'affiche. En cliquant sur la prescription dans l'arborescence des prescriptions, une boîte de dialogue s'ouvre, indiquant le statut de la prescription.

Non-contact import		Non-contact import	
Nom du dentiste	Dr Forsell	Nom du dentiste	Dr Forsell
Nom du patient	WJMO	Nom du patient	WJMO
Nombre d'essais	1	Nombre d'essais	1
Date de validation/soumission	22/08/2012	Date de validation/soumission	22/08/2012
Suivi de messagerie	Not currently available	Suivi de messagerie	courier link
 Received		 Dispatched	

Si la prescription a été expédiée, vous pouvez en suivre la progression en cliquant sur **Courier Link**.